

Quattro[®] Shoulder System

INNOVATIVE LABRAL REPAIR SYSTEM

Bankart Repair - Simple Stitch

2.9mm径のPEEK-OPTIMA[®]製

縫合糸のテンション調節操作が容易

靱帯修復を簡単に行えるノットレスアンカー




Quattro[®] Link 2.9mm
Knotless Anchor



Quattro® Link 2.9mm Knotless Anchor


Quattro® Link ノットレスアンカーは、軟部組織を骨に固定することを目的にデザインされました。特徴的なアイレットクリート機構により、アンカーを挿入するまでの間に縫合糸のテンションを調節・固定・必要に応じて解放することが可能です。

- 1 エレベーターなどを用いて関節窩から関節唇を剥がした後、関節唇にシンプルステッチを行うために、2号糸を至適位置に通します。縫合糸の自由端は前下方カニューラに引き寄せておきます。

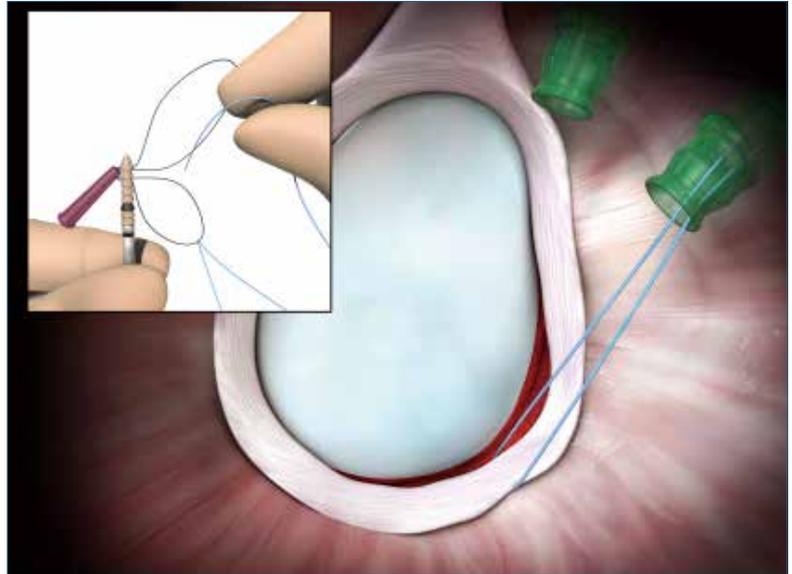

- 2 二重ループになっているスネアグループそれぞれに縫合糸の端を挿入します。スネアを引いてアンカーのアイレットに縫合糸を通します。

- 3 ドリルガイドを前下方カニューラから挿入し、関節窩のアンカー挿入位置の縁に配置してドリルガイドの固定角度を確かめ保持します。オフセットドリルガイドを用いる場合、先端部を関節窩の頸部へ当たる様に固定します。オフセットドリルガイドを用いることで、アンカーを関節窩の縁から 1.5mm の位置に設置し、より大きな関節唇バンパーを作製できます。

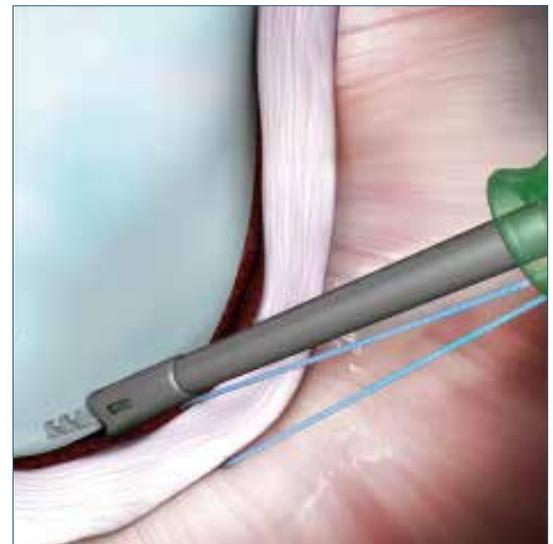


- 3a ドリルガイドのハンドル上部からドリルを挿入し、ドリルカラーがハンドルに接触するまでドリリングします。




ドリリング前に骨質を確認し、硬い骨の場合はハードボーン用ドリル (CM-9324ST) が使用できます。

- 3b ドリルガイドを関節内から抜き、アンカー先端をパイロットホールに挿入します。

- 4 アンカーへ通した縫合糸のテンションを維持しながら、アイレットが関節唇の方向へ向いている状態でアンカーを挿入します。骨孔角度に注意しながらアンカーを挿入して下さい。

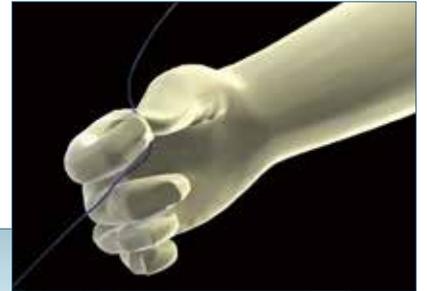


- 4a アンカー中央の黒いレーザーラインの下側までアンカーを打ち込みます。修復後のテンションを正しく決めるために、レーザーラインを超えないように注意してください。

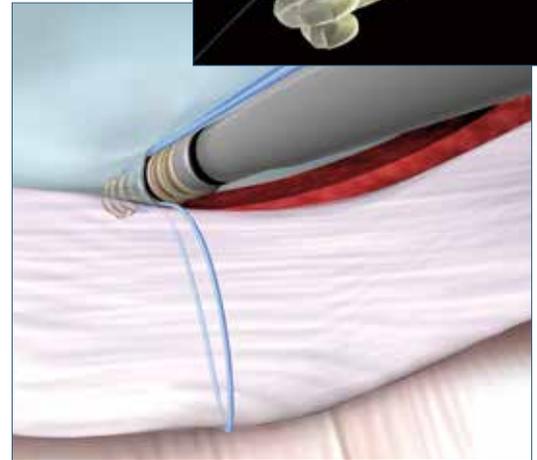


- 4b ハンドルを保持しながら、関節唇が適切な位置に近づくまで1本ずつ縫合糸にテンションをかけます。

- 4c ハンドル上部にある紫のノブを時計回りに止まるまで回すことで、アンカーのクリートが開きます。シャフトの黒いレーザーラインの下側まで打ち込んでいくと同時に縫合糸がクリートに挟まっていき、4b で決めたテンションが維持されます。

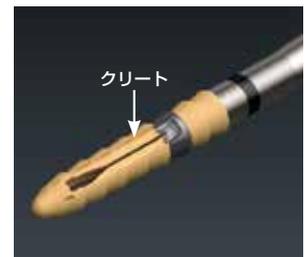


- 4d アンカーリリースレバーを押し下げた後、紫のノブを時計回りに数回まわして引き抜くと、シャフトがアンカーから外れます。

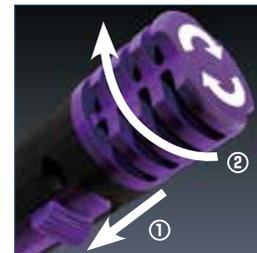

- 5 スーチャーカッターで縫合糸を切断して終了です。



禁忌、警告、予防措置を含む製品情報が添付文書に記載されています。使用前は必ず参照して下さい。

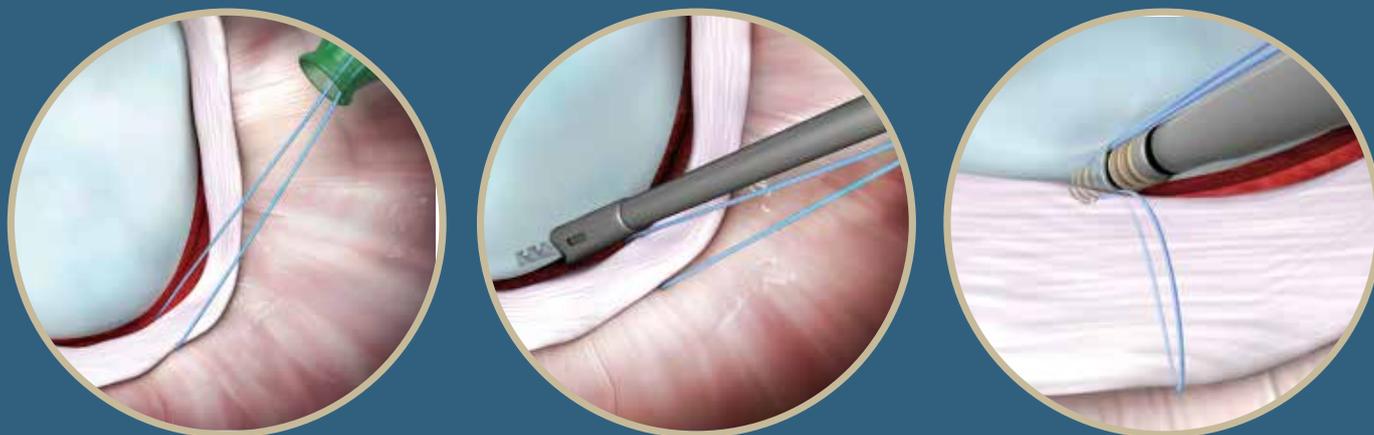

Quattro® Link 2.9mm Knotless Anchor

Ordering Information

カタログ No.	品名
CM-9129	Quattro Link ノットレスアンカー 2.9mm
CM-9300ST	Quattro Link 2.9mm ドリル (Spade-Soft Bone) ※
CM-9324ST	Quattro Link 2.9mm ドリル HB (Fluted-Hard Bone) ※
CM-9301	Quattro Link 2.9mm ドリルガイド ※※
CM-9302	Quattro Link 2.9mm オブチュレーター ※※
CM-9303	Quattro Link 2.9mm オフセットドリルガイド ※※

販売名：クアトロリンクノットレスアンカー
 医療機器製造販売承認番号：22900BZX00305000
 ※販売名：Cayenne インストルメント
 医療機器製造販売承認番号：229ADBZX00103000
 ※※販売名：靱帯再建用手術器械
 医療機器製造販売届出番号：13B1X10228ST0005



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
 Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

● カスタマーサービス (商品のご注文) Tel. 0463-30-4801
 Fax. 0463-30-4821

● 製品のお問合せ Tel. 03-6402-6619

営業拠点：札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、福岡