
# Zimmer A.T.S.2000 Tourniquet System

ジンマーATS2000タニケットシステム

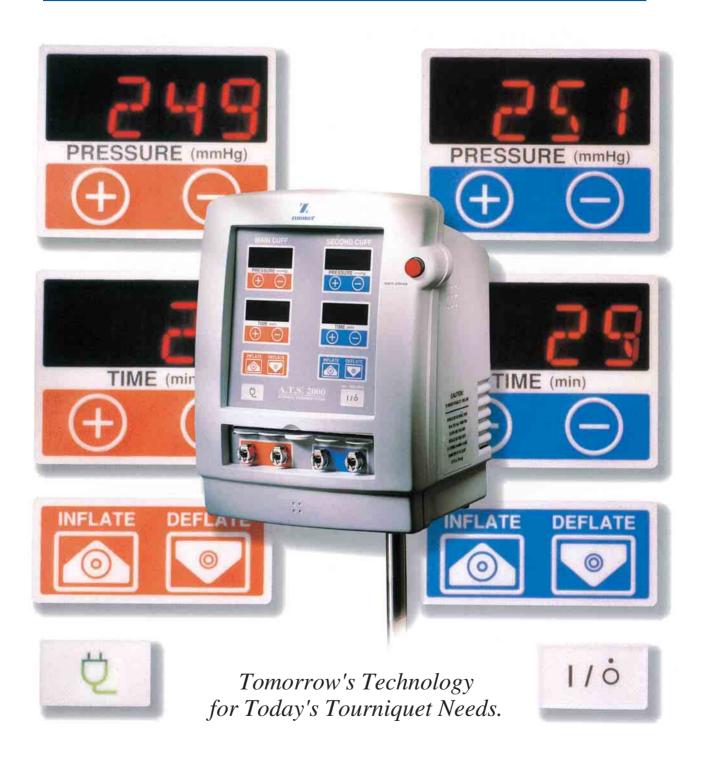



# The A.T.S.2000 Tourniquet System

# Advanced Technology & Outstanding Reliability

新設計のチップによりメインカフとセカンドカフのカフ圧、与圧時間は完全に独立した設定が可能です。

### Faster Inflation for Bloodless Field

新開発の高出力ポンプと内蔵のリザーバータンクの働きにより送気時間が1/2\*に短縮しました。 \*当社比

# **Self-Testing & Continuous Monitoring**

ATS2000タニケットはユニットをONにする毎にアラーム音、表示、ソフトウェア、ハードウェアのチャックおよび圧力センサーのキャリブレーションを自動実行し、また動作中は常にモニタリングを行う自己診断機能を装備しています。

#### Convenient Portability

ATS2000タニケットはテーブル据え置き、\\ \vert \v

### **Customized Parameters**

容易なセットアップのためにカフ圧と与圧時間は 初期設定を変更可能です。

#### Audible & Visual Alarms

カフ圧の変動、ハードウェアの誤作動、バックアップバッテリーの電圧低下等、器械、人体に危険な 状況をアラーム音とランプで知らせます。



# Low Profile Bロープロファイルブラッ

# SECOND CUFF







2000





Alarm silence

# ロープロファイル

新型ATSカフはナイロンに特殊樹脂をコーティングし た伸縮性の極めてすくないインナーチューブと外皮の 一体化によりロープロファイル化を達成いたしました。 従来より、すくない空気量にて十分な止血圧を得るこ とができ、またATS2000タニケットの送気性能の向上 と相まってスピーディーな与圧が可能となりました。



ロープロファイルシングルカフ







# **Dual Pressure Display**

高輝度ディスプレイによりカフ圧および経過時間 は常時モニタリング可能です。

# **Cuff lockout**

器械本体の故障による場合でもシャットオフバル ブによりカフ圧の低下を最小限にします。

# 2-second Delay Deflate Touch Pads

誤操作による脱気を防ぐ為、排気 (deflate) ボタンは2秒以上押しつづけた時のみ動作します。

# **Back-up Battery**

万一の停電に備えて、バックアップバッテリー\*を 内蔵しています。

\*駆動時間1時間以上(フル充電時)

# **Dual Port Technology**

ATSタニケット独自のデュアルポートシステムによりカフ本体の圧力を常時監視している為、カフ圧の表示は常に正確です。また一般のタニケットシステムでは判別不能なカフホースのねじれや詰まりによる送気不良も感知し、アラームを出します。

# **Dual Cuff Integration**

メインカフとセカンドカフのコントロールは完全に 独立しているので、Bier Block Procedureはもと より、異なったカフ圧、与圧時間を必要とする上肢 下肢同時手術も可能です。

# A.T.S.2000 Tourniquet Accessories



60-4017-001-00 カフ接続ホース(青/白) 60-4018-001-00 カフ接続ホース(赤/白)

長さ:4.0m

用途:ATS 1500/2000タニケット用

二重カフ使用時には60-4017-001-00(青/白ホース)と60-4018-001-00(赤/白ホース)を組合せ使用しメインカフとセカンドカフの区別を容易にします。

用途:カフ及び接続ホースなどの収納用。 タニケットスタンドと組合せ使用。

60-4022-001-00 タニケットスタンド



# ORDERING INFORMATION

カタログNo	品名	規 格
60-2000-101-00	ATS2000タニケット	カフ接続ホース(赤/白、青/白)各1本付き
60-1908-001-00	アクセサリーバスケット	寸法:300 (W) ×460 (D) ×130 (H) mm
60-4017-001-00	カフ接続ホース(青/白)	長さ:4m, ルアーロック用アダプター付き
60-4018-001-00	カフ接続ホース(赤/白)	長さ:4m, ルアーロック用アダプター付き
60-4022-001-00	タニケットスタンド	高さ:110~180cm, 脚巾:71cm, 5脚
60-7500-001-00	ATSシングルカフ 20cm	82 (W)×200 (L) mm 白、幼児の腕 (8-13cm)
60-7500-002-00	ATSシングルカフ 31cm	107(W)×310(L)mm 水色、幼児の脚、子どもの腕(13-23cm)
60-7500-003-00	ATSシングルカフ 46cm	107(W)×460(L)mm 赤、子どもの脚、小さい大人の腕(23-38cm)
60-7500-004-00	ATSシングルカフ 61cm	107(W)×610(L)mm 緑、中背の大人の腕、小さい大人の脚(38-53cm)
60-7500-005-00	ATSシングルカフ 76cm	107(W)×760(L)mm 青、中背の大人の脚(53-69cm)
60-7500-006-00	ATSシングルカフ 86cm	107(W)×860(L)mm 茶、大きな大人の脚(69-79cm)
60-7500-007-00	ATSシングルカフ 107cm	107(W)×1070(L)mm エンジ、極めて大きな大人の脚(79-99cm)
60-7555-001-00	ATSダブルカフ 31cm	143 (W) ×310 (L) mm 水色
60-7555-002-00	ATSダブルカフ 46cm	143 (W)×460 (L) mm 赤
60-7555-003-00	ATSダブルカフ 61cm	143(W)×610(L)mm 緑

薬事法規対象外





北海道 ·······Tel. 011-781-3367 Fax. 011-781-3368 東北·関東·中部·近畿地方···Tel. 0550-89-8522 Fax. 0120-89-3570 中国·四国·九州地方·····Tel. 092-931-7297 Fax. 092-931-7303

●修理のお問合せ·····Tel. 0120-33-8507

●製品のお問合せ······OSP······Tel. 03-6402-6664



本社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目1番17号城山MTビル7階 Tel. 03-6402-6600(代表) Fax. 03-6402-6620 http://www.zimmer.co.jp