

ATSタニケット 使用に際しての注意事項

- 初回ご使用になる24時間以上前より電源プラグをコンセントに差し込み、内蔵バッテリーを充電してください。
- 機器の正常な動作のため、常時電源プラグをコンセントに差し込み、内蔵バッテリーをフル充電状態に保ってください（内蔵バッテリー充電量が不足すると本体がご使用できません）。
- 未使用の状態でも1ヶ月以上保管する場合も、24時間以上電源プラグをコンセントに差し込み、内蔵バッテリーを充電してください（内蔵バッテリーが完全に放電すると充電できなくなる可能性があります）。



危険

可燃性麻酔薬使用又はガス常在所の近くで使用しないこと。爆発の危険性があります。



注意

- 本体を分解しないでください。感電のおそれがあります。
- 送気前には5分以上電源を入れておいてください。
- 内蔵バッテリーは、停電時や患者の一時的な移動のみに使用してください。
- 本体をスタンドに取り付ける際は、本体下部の高さが122cm以下で、スタンドの架台の直径が70cm以上であることを確認してください。
- 電気メスから1m以上離して使用してください。



ZIMMER BIOMET ジンマー・バイオメット合同会社



〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目11番1号 ☎03-6402-6600(代)

M181-6 10/16