

点検・保守管理チェックシート

機器名称:ユニバーサルコード

カタログNo.:MC-5057-000-00

シリアルNo.: _____

点検担当者: _____

点検実施日: _____ 年 _____ 月 _____ 日



	点検箇所	点検項目	判定
1	外観	ケーブルの被覆に損傷はありませんか	
2	外観	コンソール側コネクタ内のピンに、脱落や変形、汚れ、サビ、異物混入などはありませんか	
3	外観	ハンドピース側のロック部に破損、変形はありませんか	
4	機能	作動中にケーブルを曲げたり捻っても異常はありませんか	
5	機能	作動中に押しボタンスイッチを押した時の機能は正常ですか	

備考



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

お問い合わせ先:ジンマー バイオメット合同会社 メンテナンスセンター
〒254-0076 神奈川県平塚市新町6番15号
TEL:0463-30-4805、FAX:0463-30-4825