

点検・保守管理チェックシート

機器名称: マイクロパワー・レシプロケーティングソー

カタログNo.: 00-6020-023-00

シリアルNo.: _____

点検担当者: _____

点検実施日: _____ 年 _____ 月 _____ 日



点検箇所	点検項目	判定
1 外観	ハンドピース全体に著しい変形や汚れはありませんか	
2 外観	ケーブルの被覆に折損などの損傷はありませんか	
3 外観	ハンドピースコネクタ内のピンに、曲がりや変形、汚れ、サビ、異物混入などはありませんか	
4 外観	ブレードのロック機構(固定部)の動きに異常はありませんか(コレットのネジ部に錆、劣化はありませんか)	
5 外観	ON/OFF用レバーはスムーズに作動しますか	
6 外観	セーフスライドスイッチに破損はありませんか	
***** [Connect Handpiece]と表示されているコンソールにハンドピースを接続する *****		
7 機能	ハンドピースコードを接続した際ハンドピースのコネクタ部とのロック機能は正常ですか	
8 機能	ハンドピースコードの設定ボタンは動作しますか	
9 表示	コンソールに[RECIP SAW MAX 100%]と表示されますか(セーフスライドスイッチはRUNの位置)	
10 機能	レバースイッチを押してハンドピースの作動/停止ができますか	
11 機能	セーフスライドスイッチをOFFにするとレバースイッチがONでもハンドピースは停止しますか	
12 機能	作動中に異音、発熱はしませんか	
13 機能	作動中にハンドピースのケーブルを曲げたり捻っても異常はありませんか	
***** ハンドピースにブレードを接続する *****		
14 機能	ブレードの抜き差しがスムーズですか	
15 機能	ブレードを挿して作動させた際、ブレや異音はありませんか	
備考		

※ 突然の故障を防止するために、本品は12ヶ月毎の定期点検をお薦めしております。



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

お問合せ先: ジンマー バイオメット合同会社 メンテナンスセンター
〒254-0076 神奈川県平塚市新町6-15
TEL: 0463-30-4805、FAX: 0463-30-4825