

点検・保守管理チェックシート

機器名称: マイクロ100・オシレーティングソー

カタログNo.: 00-5053-012-00

シリアルNo.: _____

点検担当者: _____

点検実施日: _____ 年 _____ 月 _____ 日



合格の場合「判定」欄に✓を記入

点検箇所	点検項目	判定
1 外観	ハンドピース全体に著しい変形や汚れはありませんか	
2 外観	ブレードのロック機構(固定部)の動きに異常はありませんか(汚れやピンの破損も確認)	
3 外観	ON/OFF用レバーはスムーズに作動しますか	
4 外観	セーフスライドスイッチはスムーズに作動しますか	
5 外観	ホース接続部のオーリングに損傷はありませんか	
***** ホースとブレードを接続して機能確認 *****		
6 機能	ホースの接続はスムーズですか	
7 機能	ブレードの脱着はスムーズですか	
8 機能	レバーを押してハンドピースの作動/停止ができますか	
9 機能	ハンドピースに異音・発熱はありませんか	
10 機能	エア漏れはありませんか	
11 機能	ブレードのブレはありませんか	

備考

※ 突然の故障を防止するために、本品は12ヶ月毎の定期点検をお薦めしております。



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

お問合せ先: ジンマー バイオメット合同会社 メンテナンスセンター
〒254-0076 神奈川県平塚市新町6番15号
TEL: 0463-30-4805、FAX: 0463-30-4825