

点検・保守管理チェックシート

機器名称: パワープロ・バッテリー・モジュラーハンドピース

カタログNo.: PR-5100-000-00 (1トリガー)

カタログNo.: PR-5200-000-00 (2トリガー)



シリアルNo.: _____

点検担当者: _____

点検実施日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

合格の場合「判定」欄に✓を記入

| No. | 点検箇所 | 点検項目 | 判定 |
|------------------|------|-------------------------------|----|
| 1 | 外観 | ハンドピースに破損・変形・汚れはありませんか | |
| 2 | 外観 | 部品の欠落や緩みはありませんか | |
| 3 | 外観 | バッテリーターミナルの腐食・破損・変形はありませんか | |
| 4 | 外観 | シャフトの中空に汚れが付着していませんか | |
| ***** 機能確認 ***** | | | |
| 5 | 作動 | アタッチメントがスムーズに装着でき、確実にロックできますか | |
| 6 | 作動 | トリガーがスムーズに動きますか | |
| 7 | 作動 | F/Rボタンがスムーズに切り替えできますか | |
| 8 | 作動 | SAFEポジションでは作動しませんか | |
| 9 | 作動 | 異音・発熱は見られませんか | |
| 10 | 作動 | バッテリーの着脱がスムーズにできますか | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

備考

※ 突然の故障を防止するために、本品は12ヶ月毎の定期点検をお薦めしております。

ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

お問合せ先: ジンマー バイオメット合同会社 メンテナンスセンター
〒254-0076 神奈川県平塚市新町6番15号
TEL: 0463-30-4805、FAX: 0463-30-4825