

# 点検・保守管理チェックシート

機器名称: パワープロエアースレーターハンドピース

カタログNo.: PR-6175-000-00

シリアルNo.: \_\_\_\_\_

点検担当者: \_\_\_\_\_

点検実施日: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日



合格の場合「判定」欄に✓を記入

No.	点検箇所	点検項目	判定
1	外観	ハンドピースに破損・変形・汚れはありませんか	
2	外観	部品の欠落や緩みはありませんか	
3	外観	エアースレーター接続部に腐食・破損・変形はありませんか	
***** 機能確認 *****			
4	接続	ブレードがスムーズに装着でき、確実にロックできますか	
5	作動	トリガーがスムーズに動きますか	
6	作動	S/R(セーフ/ラン)切換えレバーがスムーズに作動しますか	
7	作動	SAFEポジションでは作動しませんか	
8	作動	異音・発熱は見られませんか	
9	接続	エアースレーターの着脱がスムーズにできますか	
10	作動	オシレーターヘッドの角度をスムーズに切り替えられますか	
備考			

※ 突然の故障を防止するために、本品は12ヶ月毎の定期点検をお薦めしております。



**ZIMMER BIOMET**  
Your progress. Our promise.™

お問合せ先: ジンマー株式会社 メンテナンスセンター  
〒254-0076 神奈川県平塚市新町6番15号  
TEL: 0463-30-4805, FAX: 0463-30-4825