

点検・保守管理チェックシート

機器名称: ストレートバーガード

カタログNo.: 00-1375-011/012/023、L3-A211/A212/A223、00-5020-060/061/062

シリアルNo.: _____



点検担当者: _____




点検実施日: _____ 年 _____ 月 _____ 日



点検箇所	点検項目	判定
1 外観	バーガードの外装に破損、変形、汚れはありませんか	
2 外観	先端部のベアリング劣化やボディ摩耗がありませんか(備考参照)	
***** 点検用バーを取り付けて機能確認 *****		
3 作動	バーガードをハンドピースにスムーズに着脱できますか	
4 作動	バーが引っ掛かることなくスムーズに挿入できますか	
5 作動	空回しさせて異音・発熱はありませんか	

備考

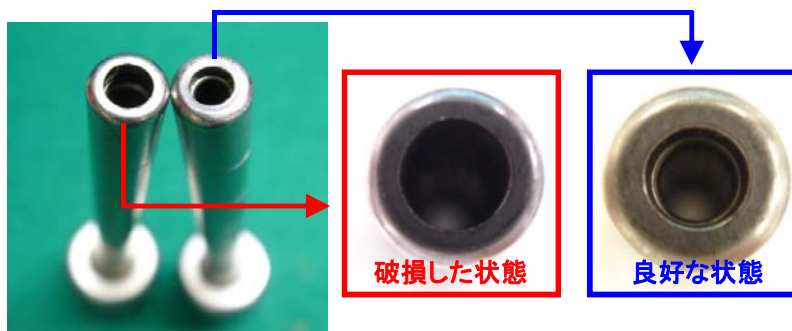

※ 突然の故障を防止するために、本品は6～12ヶ月毎の定期点検をお薦めしております。



お問合せ先: ジンマー バイオメット合同会社 メンテナンスセンター
 〒254-0076 神奈川県平塚市新町6番15号
 TEL: 0463-30-4805、FAX: 0463-30-4825