

点検・保守管理チェックシート

機器名称: ストレートバーガード

カタログNo.: 00-1375-011/012/023、L3-A211/A212/A223、00-5020-060/061/062

シリアルNo.: _____



点検担当者: _____




点検実施日: _____ 年 _____ 月 _____ 日



| 点検箇所 | 点検項目 | 判定 |
|-----------------------------|--------------------------------|----|
| 1 外観 | バーガードの外装に破損、変形、汚れはありませんか | |
| 2 外観 | 先端部のベアリング劣化やボディ摩耗がありませんか(備考参照) | |
| ***** 点検用バーを取り付けて機能確認 ***** | | |
| 3 作動 | バーガードをハンドピースにスムーズに着脱できますか | |
| 4 作動 | バーが引っ掛かることなくスムーズに挿入できますか | |
| 5 作動 | 空回しさせて異音・発熱はありませんか | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

備考

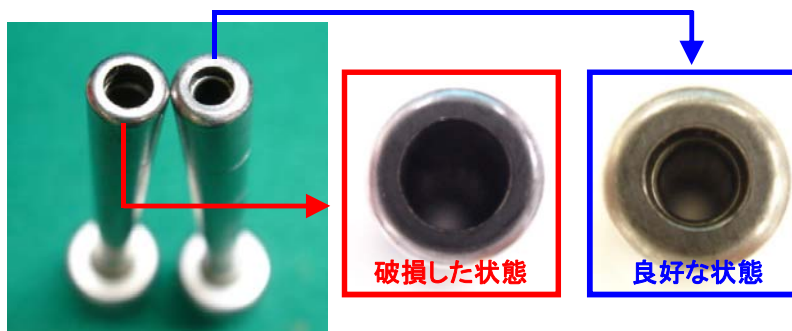

※ 突然の故障を防止するために、本品は6～12ヶ月毎の定期点検をお薦めしております。



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

お問合せ先: ジンマー バイオメット合同会社 メンテナンスセンター
〒254-0076 神奈川県平塚市新町6番15号
TEL: 0463-30-4805、FAX: 0463-30-4825