

Signature Personalized Patient Care*

Utilized with the Oxford Partial Knee

BIOMET®

Signature Personalized Patient Care



Surgeon Designed. Patient Matched.

Signature システムの Partial Knee アプリケーションでは、MRI の画像を使用し、詳細な個々の患者の 3D データを提供することで、効率を高め、部分置換術を容易にします。

Signature Partial Knee Planning Software のレイアウトには、さまざまな術前画像の選択肢が用意されており、インプラントのサイズや位置を微調整し、Signature ポジショニングガイドを作成することができます。

全ての Signature Partial Knee 症例は、部分置換術と全置換術の両方が計画されます。術者は重要な解剖を視覚化して適切な患者を識別して、それらのどちらかを承認することができる術前計画です。

- 直感的な操作を可能とするユーザーインターフェイスと機能性
- 5 方向の骨の状態から様々な視覚化オプションを提供
- 骨及びインプラント又はそのいずれかの透視画像
- フェモラルインプラント及びティビアルインプラントのサイズや位置の微調整が可能
- 術者による承認により、フェモラル及びティビアの Signature ガイドデザインが確定

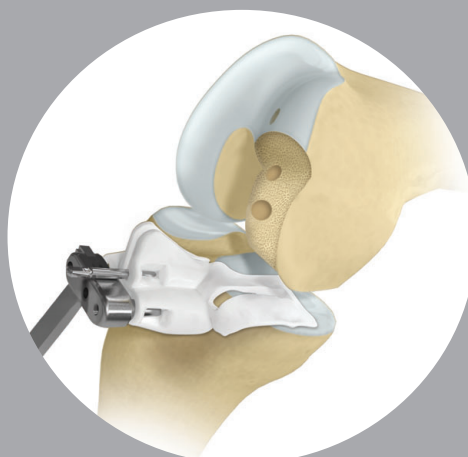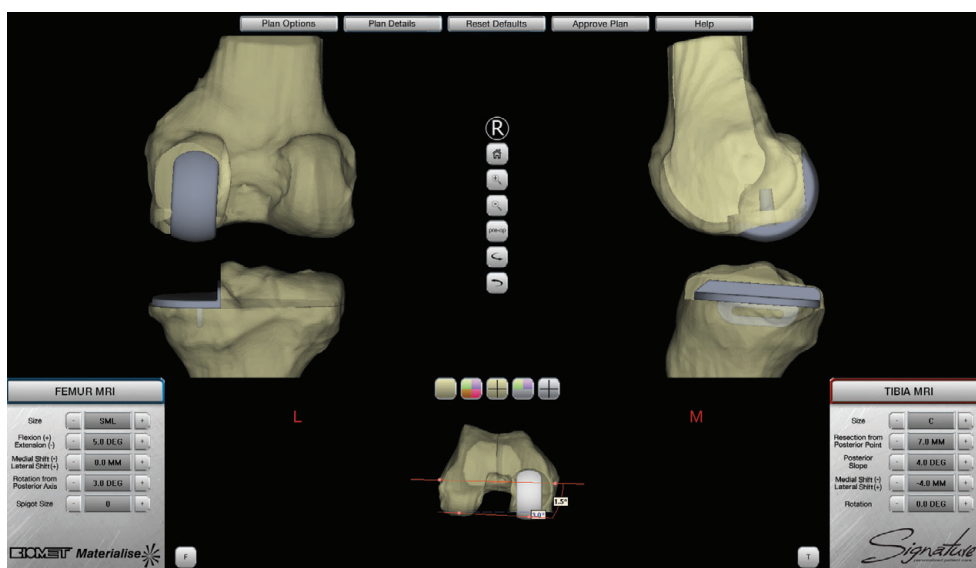

手術時チェック

全てのステップは従来の手術器械を使用することで、設置位置のチェックを手術時に行うことができます。この機能性は術前計画の確認とシステムの確信を確立することを援助します。

フェモラル・ティピアルポジショニングガイド

Signature フェモラル・ティピアルポジショニングガイドは、個々の患者の骨形態に適合し、フェモラルとティピアルの骨切り器械の位置を確定する為のガイドとして、術前手術計画を反映したものです。

- 術中に骨を確認し、従来のカットブロックが使用可能
- ティピアルガイドは、バーティカルカットの為のスリットを提供します
- 軟部組織の状態により術中に骨切除レベルの調整が可能
- 従来のアライメント確認用器械を用いた検証が可能
- 各症例で準備可能な骨モデルは、患者の大腿骨及び脛骨の解剖を明確に再現しており、以下に示す術前及び術中の計画が示されています
 - －骨切除の目印及び骨切り量
 - －骨切除レベル
 - －大腿骨及び脛骨の回旋軸
 - －ガイド設置の指標

Signature

Ordering Information

	カタログ番号	製品名	規格	
	42-411460	Signature UKA ガイド	Phase 3	X-Small
	42-411461			Small
	42-411462			Medium
	42-411463			Large
	42-411464			X-Large**
	42-411470		Microplasty	X-Small
	42-411471			Small
	42-411472			Medium
	42-411473			Large
	42-411474			X-Large**

販売名：Signature オックスフォード ガイド

承認番号：22500BZX00352000

※ Signature UKA Planning Software でフェモラルサイズの X-Large がプランニングされた場合は、必ずレントゲンでサイズ確認を行ってください。その後 X-Large をプランした時は、Single Peg (Oxford スタンダード フェモラルコンポーネント) の X-Large を選択してください。ご不明な点は、弊社営業担当者に問い合わせください。

Bone Model**

	カタログ番号	製品名
	42-411410	ボーンモデル UKA/MRI

※滅菌・洗浄方法に関しては、添付文書を参照してください。

*A collaborative partnership with Materialise N.V.

BIOMET®

One Surgeon. One Patient.

バイオメット・ジャパン株式会社

本社
〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
TEL 03-5404-5670(代) FAX 03-5404-5677

東京営業所
〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー16階
TEL 03-5404-5655 FAX 03-5404-5666

大阪第一営業所/大阪第二営業所
〒532-0003
大阪市淀川区宮原四丁目5番36号 セントラル新大阪ビル7階
TEL 06-6150-7020(代) FAX 06-6150-7021

仙台営業所
〒980-0011
仙台市青葉区上杉2丁目3番7号 K2小田急ビル7階
TEL 022-212-7331(代) FAX 022-212-7332

バイオメット・ジャパン ロジスティクスセンター
〒143-0006

東京都大田区平和島2丁目1番地1号
京浜トラクターミナル14号B棟5階

東日本お客様窓口
TEL 03-5404-5655 FAX 03-5404-5666

西日本お客様窓口
TEL 06-6150-7020 FAX 06-6150-7021

営業拠点：札幌、北関東、吉祥寺、横浜、名古屋、岡山、福岡
<https://www.biomet.co.jp/>

©2013 Biomet Japan. All trademarks herein are the property of Biomet, Inc. or its subsidiaries unless otherwise indicated.