

Zyston Straight Spacer System

Designed to enable simple insertion and accurate placement

Simple Insertion

- Secure tactile control
- Clear visualization

Accurate Placement


- Robust implant/insertion Interface
- Assertive tapered leading edge
- Markers provide confidence and confirmation



Zyston Straight Spacer System Features

Biased Teeth

鋸歯状の突起パターンは引抜き方向には強く挿入時はスムーズな設置が可能です。

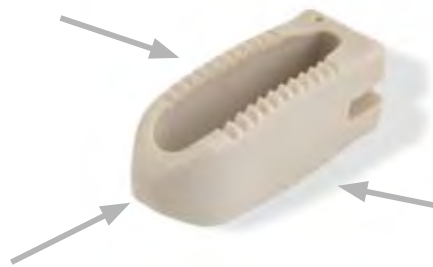

Assertive Leading Edge

テーパ形状にデザインされた先端形状により、椎間を押し広げながら設置したい方向へ進めることを容易にします。


Rounded Side Walls

サイドウォールは挿入時に抵抗が少なく、神経組織へのダメージリスクを軽減するラウンド形状です。

Radiolucent material



X線を透過する PEEK 素材により、X線写真でケージ内に充填された移植骨の骨癒合判定が容易になります。ケージ設置位置の確認は3ヶ所のX線マーカーにより可能です。

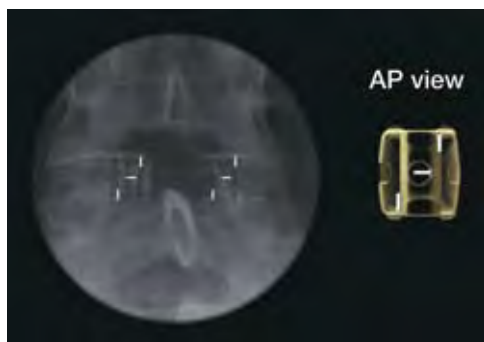

Large graft cavity



多くの移植骨が入るように広く大きくデザインされたボーングラフトホールは骨癒合で有利となり、骨充填時の操作性にも優れています。

Robust Connection



インサーターはケージを強固にホールドすることが可能で、椎間に設置する際の操作性に優れています。




Implant Variety


長さは 20mm と 25mm の 2 種類で、高さは 7mm から 14mm まで 1mm 刻みです。
高さ表示は下図 A の一番高い部分となります。

椎体終板の形状にあわせて、ラウンド形状のコンベックスと、前弯角 8 度のロードティックから
選択が可能です。

Convex

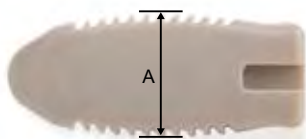

Lordotic 8°

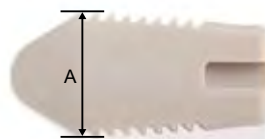

Zyston Straight Convex Implants

高さ (A)	幅	長さ	
		20	25
7	10	14-534007	14-534067
8		14-534008	14-534068
9		14-534009	14-534069
10		14-534010	14-534070
11		14-534011	14-534071
12		14-534012	14-534072
13	11	14-534033	14-534093
14		14-534034	14-534094

Zyston Straight Lordotic Implants

高さ (A)	幅	長さ	
		20	25
7	10	14-534187	14-534247
8		14-534188	14-534248
9		14-534189	14-534249
10		14-534190	14-534250
11		14-534191	14-534251
12		14-534192	14-534252
13	11	14-534213	14-534273
14		14-534214	14-534274

販売名：ZYSTON ストレートスペーサー
承認番号：22500BZX00189000

Surgical Technique

椎間板を切除した後にパドルスクレーパーやラスプ、キュレット等を用いて終板を郭清し、ケージを設置するための母床を作成します。



トライアルを用いて設置するケージのサイズを決定します。



骨を充填したケージを椎間に打ち込んで設置します。
ケージのインサーターは3種類のグリップ形状から選択可能です。



ケージの位置を確認し、更に打込みが必要なときは各種タンプをします。



Instruments - Zyston Straight Spacer System



14-533206 - 14-533214
パドルスクレーパー 6mm - 14mm



14-534908
ストレート インライン タンプ



14-533203
スロテッド マレット



14-533202
T-ハンドル 1/4 SQUARE




14-534909
ストレート V タンプ



14-533204
スライドハンマー



14-534900
ストレート インライン インサーター
14-534901
ストレート インサーター インナーシャフト

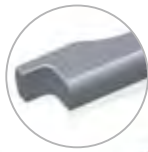

14-534910
ストレート コーナー タンプ



14-533221
スライドハンマー アダプター SMALL



14-534904 Tハンドルインサーター
14-534905
ストレート T-ハンドル インサーターシャフト



14-533205
フッテッドタンプ



14-533222
スライドハンマー アダプター LARGE



14-534906
ストレート インプラントリム-バー



14-534907
ストレート ボーングラフト モールド



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス (商品のご注文) Tel.0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821
- 製品のお問合せ Tel.03-6402-6619

営業拠点: 札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡