

# 10k イリゲーションシステム



Easy to Load  
Quick to Prime  
Friendly to Use

滅菌可能な専用ハンドリモートコントロールを使用すれば、術野から圧力や還流量を調整する事ができ、操作性が向上します。



CONMED  
LINVATEC

# 10k Fluid System

## 10k イリゲーションシステム

IVポールに  
固定設置する  
アダプター付

### EASY TO USE

- 滅菌可能なハンドコントロールを使用するとリモコン操作で圧力と還流量を調節できます。
- 簡単に装着できるチューブカセットデザインです。
- 正確な内圧と還流の流量を管理する2点式大型センサーを設置しました。
- 最大流量を2000ml/minに向上しました。

スタート  
ストップ

現内圧表示

圧力  
設定ボタン




電源

デュアルセンサー

リモートコントロール接続口

### 10kアースロスコープチューブ

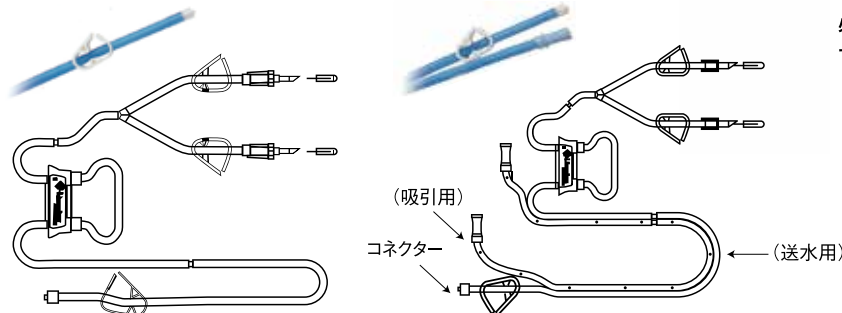

10k 100 Arthroscopy  
アースロスコープセット  
イン・フローチューブ  
(送水のみ)

10k 150 Arthroscopy  
アースロスコープセット  
イン・アウトフローチューブ  
●1箱10ヶ個入、ディスポーザブル滅菌(送水・吸引チューブ)  
注)チューブは、送水しながら使用して下さい。

### リモコン操作可能

必要な機能をリモコン  
で調整できます。



流量調整ボタン  
(High / Low)  
オートマニュアル  
圧力調整ボタン  
Run/Stopボタン

High : 2000ml/min Low : 1000ml/min

### 仕様

設定圧力: 30~150mmHg  
最大流量: 2000ml/min  
重量: 3.2kg  
外形寸法: 19.7(幅) × 16.5(高) × 20.3(奥) cmm

### 推奨圧力

膝関節: 90mmHg 肩関節: 60mmHg  
肘関節: 50mmHg 足関節: 70mmHg  
手関節: 60mmHg

注)これらの推奨値はあくまでも目安となる  
数値であり、状況によって異なります。

カタログNo.	品名
LC-10K0-000-00	10kイリゲーションコンソール
LC-10K0-100-00	10kインフローチューブセット ※
LC-10K0-150-00	10kイン・アウトフローチューブセット ※
LC-7115-000-00	ハンドリモートコントロール (滅菌可能/オートクレーブ可能) ※※

医療機器製造販売承認番号: 22100BZX00566000 販売名: 10kポンプコンソール

※ 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10228CD0026 販売名: イリゲーションポンプチュービングセット

※※ 医療機器製造販売承認番号: 22100BZX00570000 販売名: 7050イリゲーションシステム

**ZIMMER BIOMET**  
Your progress. Our promise.™

### ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階  
Tel. 03-6402-6600(代表) Fax. 03-6402-6620  
http://www.zimmerbiomet.com/ja

● カスタマーサービス(商品のご注文)..... Tel.0463-30-4801  
Fax. 0463-30-4821

● 製品のお問合せ ..... Tel.03-6402-6619

営業拠点: 札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡