

JuggerKnot Short Rigid



Simple insertion

- インサーターがステンレス製の為、ドリリングした後にガイド無しでアンカー挿入可能
- インサーター先端の折損を防ぐテーパ設計

Small

- 直視下手術用にシャフトを短く設計した JuggerKnot ソフトアンカー
- ラインナップは MaxBraid 縫合糸 #1 と #2 の 2 種類
- 骨孔径は 1.45 mm

Strong


- 平均引抜強度は #1 で 52 lbs (23.6 kgf)、#2 で 78 lbs (35.4 kgf)¹

おもな適応症例


- 肘／上腕骨外側上顆炎 ・ 膝／内側・外側側副靭帯損傷
- 足／外側靭帯損傷、腓骨筋腱脱臼、アキレス腱断裂

手術テクニック



① ドリリング

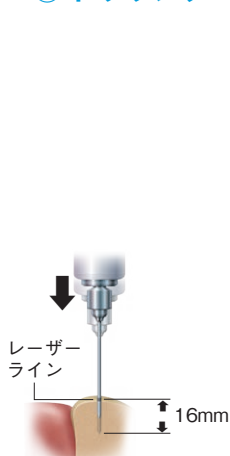

② アンカー挿入

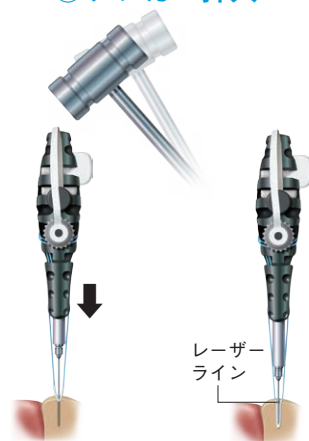

③ 縫合糸の取り外し

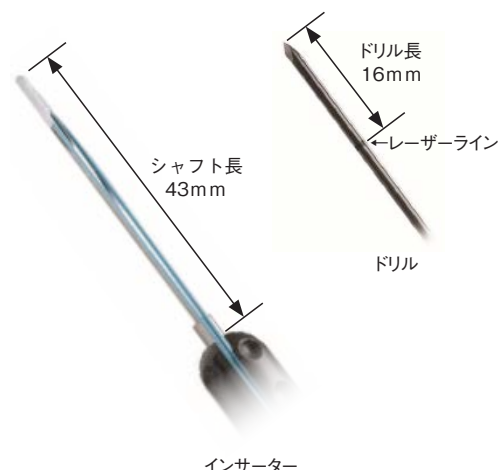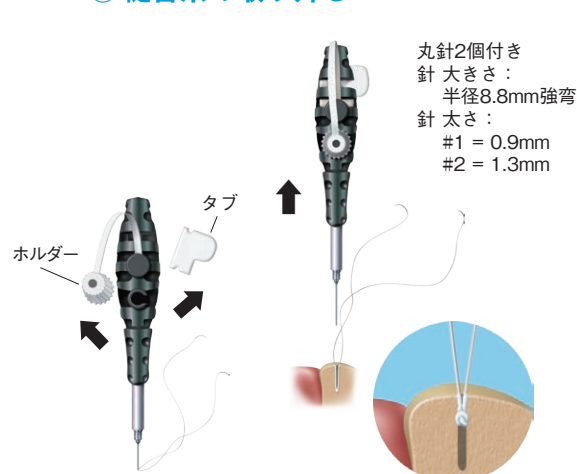

Ordering Information

カタログ番号

品名

110005307 JuggerKnot スーチャーアンカー Short Rigid #1白青 針付 (ドリル付)



110005315 JuggerKnot スーチャーアンカー Short Rigid #2青 針付 (ドリル付)



販売名：JuggerKnot ソフト アンカー システム
医療機器製造販売承認番号：22300BZX00197000

1. Data on file at Biomet BSM17.VR.2. テストは骨ブロックで実施。ベンチテストの結果は、臨床成績を示すものではありません。



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス (商品のご注文) Tel. 0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821
- 製品のお問合せ Tel. 03-6402-6619

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡