



ウルトラドライブ 3 操作マニュアル

1. AC 電源コードを接続します(背面パネル)。



2. フットスイッチを接続します(前面パネル)。



接続時、本体に印されている ■マークとフットスイッチコードの ●マークが一致する位置で挿入してください。

3. フットスイッチの位置を最適な位置に置きます。




4. ハンドピースを接続します(前面パネル)。



本体に印されている ■マークとフットスイッチコードの ●マークが一致する位置で挿入してください。

5. ハンドピースにイリゲーションクリップを設置し、チューブを接続します(清潔操作)。

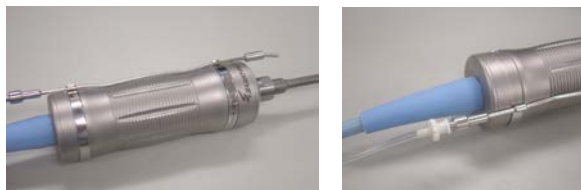

6. 黒いイリゲーションチューブコネクター部を下方のチューブホルダー(黒矢印)へ、白のコネクター部を上方のホルダー(白矢印)へ設置します。



7. イリゲーションスパイクを生食バックに差し込みます。



8. 使用予定のエクステンダーをハンドピースに専用レンチを用いて取り付けます(清潔操作)。




9. 使用予定のチップをエクステンダーに専用レンチを用いて取り付けます(清潔操作)。



エクステンダー、チップの取り付け方法



矢印  同士を一直線上に合わせて挿入し、90 度回転させた後、レンチで締めます。



10. コンソールの電源を入れます(前面パネル)。



11. ハンドピースの U/SPOWER(超音波の出力)を設定します(前面パネル)。



各チップの最大設定値以下の値で設定します。

12. 使用するハンドピース A または B を選択します。



13. イリゲーションチューブ内の空気が完全に無くなるまで PRIME ボタンを押し続けます(イリゲーションクリップの先端から生食水が出てくるまで)。



14. イリゲーションレベルを設定します。



15. 操作音量の調節をします。



16. 操作を開始します。



左のペダル: イリゲーションのみ可動

右のペダル: イリゲーションとハンドピースが可動

ハンドピース テクニックランプ:

3 色のカラーバーで使用中のハンドピースの出力が表示されます。カラーバーが緑色を示している場合は、ツールチップが適切な状態で使用されていることを示します。最適な状態は、緑色の表示の80%程度の状態です。黄色を示している場合は、オーバーロードに近づいていること示し、赤色の場合は、オーバーロードになり、ハンドピースは正常に機能しません。

