

病院・特約店の着荷時とご使用前に必ず、 動作チェックをお願い致します


>電気製品の為、搬送時の振動によりコネクタの接触不良が発生することがあります。

《動作チェック手順》

本体接続

- ・電源コード
- ・フットスイッチ
- ・ハンドピース

(ブレードは装着する必要なし)

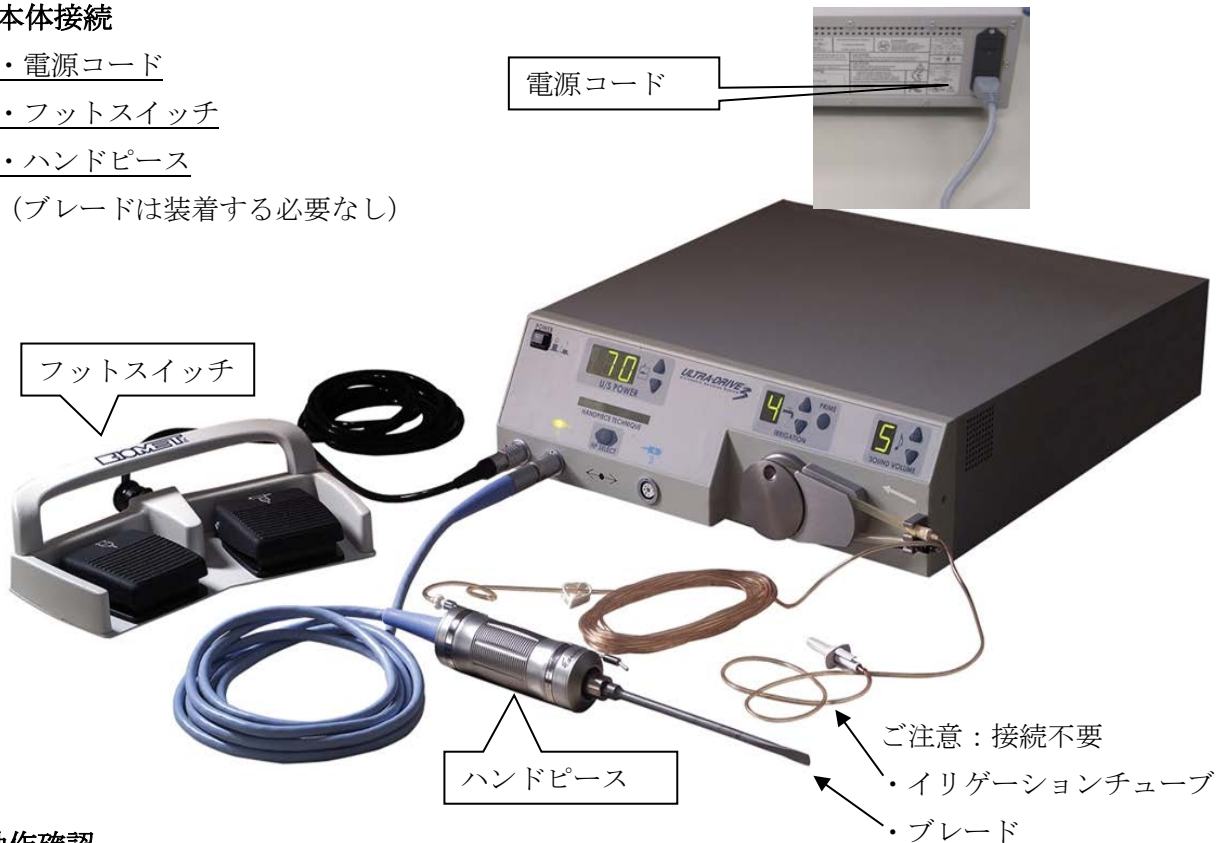


動作確認

1. 上記、接続完了 (パワーコード、フットSW、ハンドピース)
2. Power "ON"
3. ハンドピースを持ち、
先端部に指で軽く触れる。



4. フットスイッチ
右側を踏む。

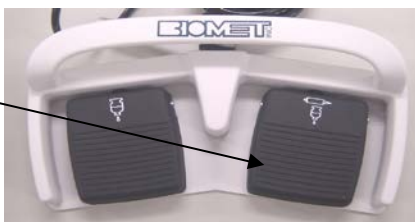

5. 3. ハンドピースの先端に触っている指に僅かに振動を感じれば、動作確認完了。
指先が熱くなるので、注意して下さい。

以上