

点検・保守管理チェックシート

機器名称:メッシュグラフト2
カタログNo.:00-2195-001-00

シリアルNo.: _____

点検担当者: _____

点検実施日: _____ 年 _____ 月 _____ 日



合格の場合「判定」欄に✓を記入

	点検箇所	点検項目	判定
1	外観	本体に破損、変形、汚れはありませんか	
2	外観	各部に緩みはありませんか	
3	外観	カッター刃にキズ・磨耗などの劣化はありませんか	
《メッシュ機能の確認》 メッシュ試験には、その都度消耗品のダーマキャリアと紙片(プリンター用紙など)を適当な大きさにカットしたものを使用します。ラチェットハンドルでローラーを回転させ、紙片にメッシュ状(網目状)の切れ目を入れて確認します。			
4	作動	紙片の切れ目は均一にカットされていますか	
5	作動	ラチェットハンドルのラチェット機能は正常に働きますか	

※ 突然の故障を防止するために、本品は12ヶ月毎の定期点検をお薦めしております。



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

お問い合わせ先:ジンマー バイオメット合同会社 メンテナンスセンター
〒254-0076 神奈川県平塚市新町6番15号
TEL:0463-30-4805、FAX:0463-30-4825