




# E-7

**Single Use  
Pulse Lavage**

**CALEB**  
INNOVATIVE MEDICAL DEVICE


# E-7 Key Features

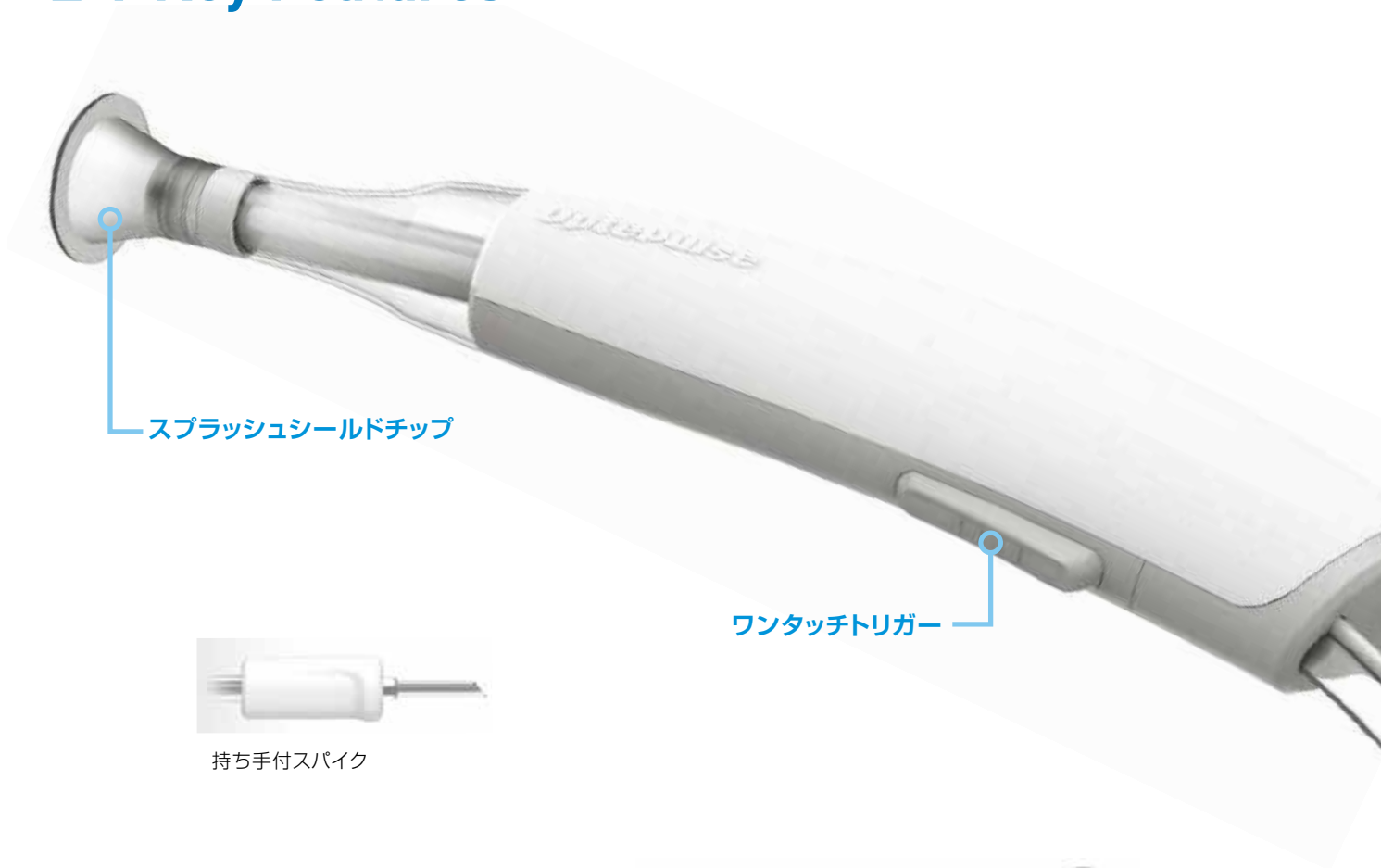

持ち手付スパイク



ハンガー付バッテリーパック

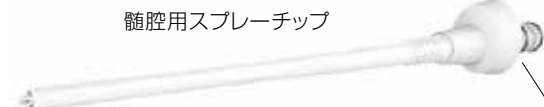

髄腔用スプレーチップ

ロックリング

## 付属チップ



スプラッシュシールドチップ



髄腔用スプレーチップ

\*水流量：1200ml/min



ワイドな噴射パターン



4穴噴射で、髄腔壁を洗浄

ノズル長：201mm

チップ外径：9mm

# 取扱手順

## 開封 \*本製品は二重包装滅菌となっております



① 箱から取り出します。



② 白いタイベック部分を持ち、開封します。



③ 中身は清潔野で受け取ります。

## チップの脱着



① チップを本体に斜めに差し込みます。



② 回しながら装着します。



③ 取り外す場合は逆向きに回して引いてください。



※髄腔用スプレーチップについても、同様に脱着してください。

## 組み立て全体図



# バッテリー廃棄手順

## バッテリーパックの分解



① バッテリーパックの四隅の穴にドライバー等の先端を差し込みます。



② 差し込んだドライバー等をひねって開けます。



③ バッテリーパック内部のバッテリーを取り出します。

## バッテリー、コードの分解



① コードのバッテリー付着部を持ちます。



② 引っ張るとコードを取り外すことができます。



③ コードを取り外したバッテリーを処分してください。  
\*バッテリーのカバーは破かないようにしてください。  
発火の恐れがあります。



\*コードの取り外し後、上図の金具どうしが触れないように注意してください。発火の恐れがあります。金具をテープなどで固定していただくと、より安全に廃棄が可能となります。

## 廃棄時の注意

- 本製品を使用後、廃棄する際はバッテリーが入ったままバッテリーパックのコードを絶対に切断しないでください。感電、発熱、発火などの恐れがあります。
- バッテリーは各地方自治体の条例と規則、及び各医療施設における廃棄手順に基づいて廃棄してください。
- バッテリーパックを液体に浸さないでください。
- バッテリーはアルカリ乾電池です。バッテリーの取り外しには帯電防止のためゴム手袋と防護メガネを装着して実施してください。
- バッテリー先端の端子どうしは絶対に付着させないでください。右図のように、発火の恐れがあります。



## Ordering Information

カタログNo.	品名	付属品
E-7	E-7 シングルユース パルスラバージ	スプラッシュシールドチップ/髄腔用スプレーチップ *本製品は10個単位で売上販売のみの出荷とさせていただきます
販売名: ジンマー・バイオメット パルスラバージシステム 医療機器製造販売認証番号: 225ADBZX00159000		



### ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階  
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620  
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス (商品のご注文) ..... Tel. 0463-30-4801  
Fax. 0463-30-4821
  - 修理のお問合せ ..... Tel. 0463-30-4805
  - 製品のお問合せ ..... Tel. 03-6402-6604
- 営業拠点: 札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、福岡