



## HEMOVAC® Autotransfusion Systems

回収式自己血輸血装置  
ヘモバックオートトランス  
フュージョンシステム



Solutions in Reinfusion

# HEMOVAC® Autotransfusion System 回収式自己血輸血装置

吸引器一体のシステムにより、回収時の安全性と確実性・経済性を実現します。

## 低陰圧による溶血防止

- ・ 低圧持続吸引器 (50mmHg) により溶血の問題を減らします。

## 簡単なセットアップと操作性

- ・ ラテックスフリーの一体型吸引器により、吸引装置や配管への接続は不要です。
- ・ 電動ポンプ等を使用せず静音で作動します。
- ・ 使用後は丸ごと安全に廃棄することができます。
- ・ 搬送用ストレッチャーやベッドサイドに取付け可能です。

## 優れた経済性

- ・ 自己血輸血後に、インフェクションコントロール ヘモバックとしてもご使用できます。

## 排液収集バック(容量450ml)

血液回収終了後に吸引機単体でドレナージとして使用するときの排出液回収バックとして使います。廃液量計量可能。



## 使用上の注意

- ・ 回収開始から6時間以内に再輸血を完了してください。(米国血液銀行協会の基準より)
- ・ 返血の際には40ミクロンのマイクロアグリゲートフィルターを必ずご使用下さい。
- ・ 抗凝固剤を使用する場合は、収集ボトルへ600ml単位の投与をお勧めいたします。(投与量については、薬剤の添付文書をご参照ください)

## 再輸血に適さない症例

- ・ 敗血症・悪性腫瘍・腎機能および肝機能障害のある場合・コラーゲン系止血薬を使用した場合
- ・ 細菌感染症の疑いがある患者・血液凝固障害や貧血傾向の疑いがある患者
- ・ その他、医師が不適当と認める患者

| カタログNo.        | 品名                                    |
|----------------|---------------------------------------|
| 00-2555-020-05 | ヘモバック オートトランス フェュージョン(3.2mm)PVC Drain |
| 00-2555-030-05 | ヘモバック オートトランス フェュージョン(4.8mm)PVC Drain |
| 00-2555-050-05 | オートトランスフェュージョン交換用収集ボトル(5ヶ/箱)          |

医療機器製造販売承認番号:20600BZY00348000 販売名:ヘモバック オートトランス フェュージョン  
\*600ml以上の血液の継続回収には、交換用収集ボトル00-2555-050-05をご利用ください。

## 使用に際しての禁忌事項

- ・ 本製品はいかなる場合でも再使用しないでください。
- ・ 収集ボトルに回収した血液は、冷蔵保存や冷凍保存して使用することはできません。
- ・ 返血に対する詳細は各施設所定の自己血輸血ガイドラインをご参考にしてください。



## ジンマー株式会社

本社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目1番17号 神谷町プライムプレイス7階  
Tel. 03-6402-6600(代表) Fax. 03-6402-6620  
<http://www.zimmer.co.jp>

- カスタマーサービス(商品のご注文) .....Tel. 0550-89-8522  
Fax. 0120-89-3570
- 修理のお問合せ.....Tel. 0120-33-8507
- 製品のお問合せ.....Tel. 03-6402-6604