

# 点検・保守管理チェックシート

機器名称: JACEユニバーサル CPM

カタログNo.: JC-7725-001-00

シリアルNo.: \_\_\_\_\_

点検担当者: \_\_\_\_\_



点検実施日: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

合格の場合「判定」欄に✓を記入

No.	点検箇所	点検項目	判定
1	外観	全体に破損、著しい変形や汚れはありませんか	
2	外観	フレームの長さ調整ノブ(6箇所)に緩みはありませんか	
3	外観	各部のネジに緩みはありませんか	
4	外観	電源コード差込部に破損や変形、緩みはありませんか	
5	外観	コントローラーケーブル及び安全スイッチに傷等はありませんか。又本体との接続は確実ですか	
6	外観	ソフトグッズの取り付けは確実ですか	
***** 電源コードを接続する *****			
7	表示	電源スイッチをONにしコントローラーの表示にかけや割れがありませんか	
8	表示	コントローラーの各パラメーターの設定に異常はありませんか	
9	動作	動作時に異音、動作異常、エラーの発生はありませんか	
10	動作	安全スイッチを押すことにより動作が停止しますか	
備考			

※ 突然の故障を防止するために、本品は12ヶ月毎の定期点検をお薦めしております。



**ZIMMER BIOMET**  
Your progress. Our promise.™

お問い合わせ先: ジンマー バイオメット合同会社 メンテナンスセンター  
〒254-0076 神奈川県平塚市新町6番15号  
TEL: 0463-30-4805、FAX: 0463-30-4825