

点検・保守管理チェックシート

機器名称:ホール50 モジュラーハンドピース

カタログNo.:PR-7100-B00-00 (1トリガー)

カタログNo.:PR-7200-B00-00 (2トリガー)

シリアルNo.: _____

点検担当者: _____

点検実施日: _____ 年 _____ 月 _____ 日



合格の場合「判定」欄に✓を記入

	点検箇所	点検項目	判定
1	外観	ハンドピースに破損・変形・汚れはありませんか	
2	外観	部品の欠落や緩みはありませんか	
3	外観	バッテリーターミナルの腐食・破損・変形はありませんか	
***** バッテリーを接続して機能確認 *****			
4	接続	バッテリーの着脱がスムーズにできますか	
5	接続	アタッチメントがスムーズに装着でき、確実にロックできますか	
6	作動	トリガーがスムーズに動きますか	
7	作動	モード切り替えレバーがスムーズに作動しますか	
8	作動	モードがSAFEの位置ではトリガーを引いても作動しませんか	
9	作動	異音・発熱は見られませんか	
備考			

※ 突然の故障を防止するために、本品は12ヶ月毎の定期点検をお薦めしております。

ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

お問い合わせ先: ジンマー バイオメット合同会社 メンテナンスセンター
〒254-0076 神奈川県平塚市新町6番15号
TEL: 0463-30-4805、FAX: 0463-30-4825