

点検・保守管理チェックシート

機器名称:ホール50 オシレーティングソーハンドピース

カタログNo.:PR-7300-B00-00

シリアルNo.: _____

点検担当者: _____


点検実施日: _____ 年 _____ 月 _____ 日



合格の場合「判定」欄に✓を記入

点検箇所	点検項目	判定
1 外観	ハンドピースに破損・変形・汚れはありませんか	
2 外観	部品の欠落や緩みはありませんか	
3 外観	バッテリーターミナルの腐食・破損・変形はありませんか	
***** 機能確認 *****		
4 接続	バッテリーの着脱がスムーズにできますか	
5 作動	ブレードがスムーズに装着でき、確実にロックできますか	
6 作動	トリガーがスムーズに動きますか	
7 作動	モード切り替えレバーがスムーズに作動しますか	
8 作動	モードがSAFEの位置ではトリガーを引いても作動しませんか	
9 作動	異音・発熱は見られませんか	
10 作動	オシレーターヘッドの角度をスムーズに切り替えられますか	
備考		

※ 突然の故障を防止するために、本品は12ヶ月毎の定期点検をお薦めしております。



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

お問合せ先: ジンマー バイオメット合同会社 メンテナンスセンター
〒254-0076 神奈川県平塚市新町6番15号
TEL: 0463-30-4805、FAX: 0463-30-4825