

点検・保守管理チェックシート

機器名称:ホール50 レシプロケーティングソーハンドピース

カタログNo.:PR-7400-B00-00

シリアルNo.: _____

点検担当者: _____

点検実施日: _____ 年 _____ 月 _____ 日



合格の場合「判定」欄に✓を記入

点検箇所	点検項目	判定
1 外観	ハンドピースに破損・変形・汚れはありませんか	
2 外観	部品の欠落や緩みはありませんか	
3 外観	バッテリーターミナルの腐食・破損・変形はありませんか	
4 外観	コレット先端部のツメは破損していませんか(ロックナットを緩めて確認)	
***** 機能確認 *****		
5 接続	バッテリーの着脱がスムーズにできますか	
6 作動	ブレードがスムーズに装着でき、確実にロックできますか	
7 作動	ブレードを指で回したとき、90度の位置で止まりますか(ロックナットを少し緩めて確認)	
8 作動	トリガーがスムーズに動きますか	
9 作動	モード切り替えレバーがスムーズに作動しますか	
10 作動	モードがSAFEの位置ではトリガーを引いても作動しませんか	
11 作動	異音・発熱はありませんか	

<注意>コレット先端部のツメを破損する恐れがありますので、作動点検は必ずブレードを取り付けるか、ロックナットを固く締めて行ってください。

備考

※ 突然の故障を防止するために、本品は12ヶ月毎の定期点検をお薦めしております。



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

お問合せ先:ジンマー バイオメット合同会社 メンテナンスセンター
〒254-0076 神奈川県平塚市新町6番15号
TEL:0463-30-4805、FAX:0463-30-4825