

¿Qué es el Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI?

El Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI es un dispositivo probado, seguro y efectivo para el tratamiento de faltas de uniones de fracturas y fusiones fallidas. Consiste en una bobina de tratamiento terapéutico configurada de manera anatómica, que se coloca directamente sobre la zona de no unión de la fractura o fusión fallida para ayudar en la curación.



Zimmer Biomet: Un Nombre en El Que Puede Confiar

Los dispositivos de estimulación no invasivos de Zimmer Biomet poseen un linaje descendiente a Electro-Biology, Inc. (EBI), un pionero en la industria que introdujo mundialmente el primer dispositivo eléctrico de estimulación del crecimiento óseo no invasivo aprobado por la FDA hace más de 30 años. El completo servicio de asistencia al cliente y de ventas de Zimmer Biomet ayuda a los médicos y a los pacientes a obtener acceso a tecnologías de tratamiento terapéutico adecuadas, además de trabajar con cada paciente para optimizar y controlar su cumplimiento, realizar un seguimiento del progreso y ayudar con las gestiones para el reembolso por parte del seguro.

Obtener Más Información en Línea

Para obtener más información sobre el Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI y sobre el proceso de curación ósea, visite www.learnaboutbonehealing.com.

Para obtener información sobre el producto, consulte con su cirujano y visite www.zimmerbiomet.com/bonehealing.

◊ **FÁCIL** de usar. Aplicación **RÁPIDA** del dispositivo.
Clínicamente **PROBADO**.

INDICACIONES: El Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI - P790002/S028 está indicado en el tratamiento de falta de unión de fracturas, fusiones fallidas y pseudoartrosis congénita en el sistema apendicular.

USO: Estos sistemas son dispositivos eléctricos terapéuticos duraderos previstos para su uso en un solo paciente únicamente con receta médica. Las Leyes Federales (EE.UU.) limitan el permiso de venta de estos dispositivos a médicos o a personal facultativo designado por los mismos. Solo por Prescripción Facultativa. Solo con Receta. Uso en un Solo Paciente. Prohibida su Reventa o Redistribución. No Reutilizar.

CONTRAINDICACIONES: Fracturas con falta de unión en las que existe pseudoartrosis sinovial (separación llena de líquido). En determinadas condiciones, la estimulación electromagnética podría inhibir la acción de determinados marcapasos de demanda o desfibriladores implantables. Por tanto, no se recomienda en el caso de pacientes con determinados tipos de marcapasos o desfibriladores implantables. Los pacientes deben tener cuidado durante la estimulación para evitar acercarse mucho a pacientes con marcapasos o desfibriladores. No se ha evaluado el uso de estos dispositivos en pacientes embarazadas; por lo tanto, no se recomienda su uso en estos casos.

Para obtener información completa sobre su prescripción, incluidos los porcentajes de éxito, advertencias y precauciones, visite www.zimmerbiomet.com/bonehealing o llame al 1.800.526.2579.



Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI

Folleto de Información para Pacientes



El Proceso de Curación Ósea

El hueso es uno de los tejidos del cuerpo humano que tiene la capacidad de curarse cuando sufre una lesión, de forma muy parecida a la piel y otros tejidos. Cuando se fractura un hueso, el cuerpo produce de forma natural impulsos eléctricos de bajo nivel que ayudan a curar la fractura. A veces, la fractura puede no curarse por sí sola. Esto tiene como resultado lo que es conocido como una falta de unión de la fractura. El Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI es un método probado, seguro y efectivo para ayudar en la curación de fusiones fallidas y fracturas que muestran una falta de unión.

¿Cómo funciona el Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI?

Su médico ha prescrito el Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI para ayudar a curar la falta de unión de la fractura o el problema en la fusión. El Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI es un dispositivo probado, seguro y efectivo formado por una bobina de tratamiento configurada de manera anatómica que se coloca sobre una escayola o directamente sobre la piel. Una unidad de control electrónico envía un campo electromagnético pulsante al lugar de la fusión fallida o de la fractura donde existe la falta de unión. La bobina es ligera y fácil de colocar. El Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI funciona con batería, es portátil y fácil de usar. Podrá tratar la fusión fallida o la falta de unión de su fractura mientras realiza sus actividades diarias, descansa o duerme.

¿Cuánto tiempo tendré que llevar el dispositivo?

Se recomienda llevar el estimulador del Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI 10 horas al día. Algunos factores de riesgo, como fumar y la instrumentación, pueden influir en la duración del tratamiento. Zimmer Biomet recomienda que su médico supervise de cerca el proceso de curación para determinar cuánto tiempo debe durar el tratamiento con el dispositivo. Es importante que utilice el dispositivo según lo indicado en la prescripción.

¿Cómo sé si el sistema funciona?

El Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI se ha diseñado para que resulte cómodo de usar, fácil de llevar y se pueda utilizar de forma segura. No sentirá cómo el Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI aplica la señal de tratamiento terapéutico a la zona de la fusión fallida o de la falta de unión de la fractura. Cuando el sistema se active correctamente, se iluminará la pantalla LCD del dispositivo con la palabra TREATING (tratamiento) y parpadeará el botón de retroiluminación. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el teléfono de atención al cliente de Zimmer Biomet al 1.800.526.2579.

¿Es seguro su uso con IRM?

Los procedimientos o exploraciones con IRM (imágenes por resonancia magnética) no se deben realizar hasta que se haya removido del todo el Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI.

¿Es seguro usarlo durante el embarazo?

No se ha evaluado el uso del Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI durante el embarazo; por lo tanto, no se recomienda.

Uso un marcapasos. ¿Puedo usar el Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI?

No. El uso de un marcapasos o cardioversor está contraindicado con el Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI; por lo tanto, no se recomienda.



¿Mi seguro cubrirá el costo del dispositivo?

La cobertura de los seguros varía en función del plan que tenga contratado. El Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI está reconocido normalmente por Medicare, Medicaid, la compensación a los trabajadores, así como algunos planes de salud privados y públicos. El Grupo de Defensa del Paciente de Zimmer Biomet le puede ayudar y responder preguntas sobre la cobertura, los elementos desgravables y los posibles gastos imprevistos. Puede ponerse en contacto con el Grupo de Defensa del Paciente al 1.888.236.3652.

¿Cuál es el proceso para obtener un Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI?

Solo puede obtener el Sistema de Curación Ósea Biomet® EBI mediante prescripción médica.

¿Con quién puedo ponerme en contacto si tengo alguna pregunta?

Los representantes del servicio de atención al cliente de Zimmer Biomet responderán a todas sus preguntas al 1.800.526.2579.